

## Instruktioner för Skötbord Björk



### Innehållsförteckning:

Teknisk beskrivning  
Säkerhetsinstruktioner  
Monterings & Installationsanvisning  
Skötselråd  
Reservdelar  
Återanvändning

**Jeltec AB**  
**Idögatan 35**  
**582 78 Linköping**

Tel.: 013-14 83 00  
E-post: [info@jeltec.se](mailto:info@jeltec.se)  
Internet: [www.jeltec.se](http://www.jeltec.se)

Utgåva 01-2016  
Instruktionsbok i original

***Endast behörig personal får använda skötbordet!***

Innan skötbordet tas i bruk **skall** användaren skaffa sig kunskaper om handhavande, risker och säkerhet. Detta sker genom att studera bruksanvisningen, samt genom att alltid följa givna instruktioner.

***Skötbordet med dess tilläggsutrustning är ingen lekplats – ha alltid uppsikt över barnen!***

Skötborden är helt igenom tillverkade för minsta möjliga negativa inverkan på miljön, både under tillverkningsprocessen och som färdig produkt, samt inte minst för att möjliggöra en korrekt återvinning.

Förändringar av skötbordet som påverkar drift- eller funktionssäkerhet är inte tillåtna. Diskutera planerade förändringar med Jeltec för att få en bedömning av lämpligheten och vilka konsekvenser som uppstår. Vi tar endast ansvar för sådana förändringar som gjorts med vårt skriftliga medgivande.

***OBS!***



***Det är viktigt att samtliga personer som ska använda skötbordet läser igenom och följer instruktionerna i bruksanvisningen.***

***Lämna därför dessa dokument till personalen efter installationen!***

***Dessa instruktioner ska åtfölja skötbordet om det flyttas till annan plats.***

## Teknisk Beskrivning Skötbord Björk

Följande modeller omfattas av denna instruktion

	
<p>Björk med hel skiva i måtten 60, 100, 120 och 140cm</p>	<p>Björk med hel tvättho finns i måtten 100, 120, 140, 180 och 220cm</p>

Modell:	Björk 60	Björk 80	Björk 100	Björk 120	Björk 140	Björk 180	Björk 220
Bredd, skötbordsskiva:	600 mm	800 mm	1000 mm	1200 mm	1400 mm	1800 mm	2200 mm
Djup, skötbordsskiva:	800 mm	800 mm	800 mm	800 mm	800 mm	800 mm	800 mm

### Gemensamma uppgifter

- Skötborden är avsedda att placeras fristående i t.ex. ett skötrum
- Bordsytans höjd över golv: ca 900 mm.

### Säkerhetsinstruktioner

Skötbordet är konstruerat för att förebygga och undvika skador och olyckor. Det är ändå mycket viktigt att användaren är väl instruerad i sättet att installera och handha skötbordet.

**• Det är viktigt att barn på skötbordet eller i dess närhet alltid hålls under strikt uppsikt. Lämna aldrig ett barn obevakat på skötbordet. Skötbordet är ingen lekplats!**

- Handhavandet måste ske på ett sådant sätt att risk för skador på person och egendom inte uppstår.
- Skötbordet får endast handhas av personer som läst och förstått dessa instruktioner och har behörighet att använda det. Tänk på att du som användare har ansvar för att ingen kommer till skada.
- Skötbordet och arbetsområdet måste vara i fullgott skick. Skötbordet får ej användas om skador eller fel uppkommit som påverkar drift- och funktionssäkerheten, ej heller om skötbordet har reparerats, ändrats eller justerats utan ansvarig persons tillstånd och godkännande.
- Tillse att skötbordet står stadigt och plant.
- Förändringar av skötbordet som påverkar drift- eller funktionssäkerhet är inte tillåtna. Diskutera planerade förändringar med Jeltec för att få en bedömning av lämpligheten och vilka konsekvenser som uppstår. Vi tar endast ansvar för sådana förändringar som gjorts med vårt skriftliga medgivande.
- Skyltar och märkningar får ej avlägsnas eller göras oläsliga.
- Flytta inte Skötbordet utan att först koppla loss vatten- och avloppsanslutningar, om det är försett med tvättho.
- Vid inspektioner, service och reparationer ska skötbordsytan vara tömd.
- Installation, service och reparationer får endast utföras av personal som har erforderlig kompetens.
- Endast Jeltec originalreservdelar ska användas vid utbyte av delar. Vårt garantiåtagande kan annars upphävas i sin helhet

## **Monterings & Installationsanvisning**

För att få störst glädje av skötbordet och för att göra installation och handhavande så enkelt som möjligt, läs noga igenom följande instruktioner och tips innan Ni påbörjar arbetet.

Varm- och kallvattenslangar medföljer inte leveransen. De anpassas till varje enskild installation. Anslutning till vatten och avlopp ska utföras av kompetent person.

*Felaktigt montage kan innebära risker för läckage med vattenskador som följd.*

### **Installation**

Placera stativet på avsedd plats och justera för eventuella ojämnheter i golvet med de ställbara justerskruvarna golvstativet, så att skötbordet står stadigt och i våg på golvet.

Montera vattenblandaren i det fall skötbordet är utrustat med tvättedel. Se till att de medföljande packningarna monteras på rätt sätt, för att undvika vatteninträning i skötbordsskivan. Ytterligare information om blandaren kan fås på [www.moraarmatur.se](http://www.moraarmatur.se).

Anslut varm- och kallvatten via avpassade slangar (ingår ej i leveransen).

Anslut den medlevererade avloppsslangen från bottenventilen till lämplig golvbrunn eller annat avlopp.

Lägg skötbordsmadrassen på skivan. Bordet är nu klart för att användas!

***OBS! Det är viktigt att samtliga personer som ska använda skötbordet läser igenom och följer instruktionerna i bruksanvisningen. Lämna därför dessa dokument till personalen efter installationen!***

## **Skötselråd**

Skötbordet rengörs med ljummet vatten och ett icke repande rengöringsmedel, innehållande tvål eller liknande. Använd Wettextrasa eller liknande. Efter rengöring ska ytorna torkas torra för att undvika kalkavlagringar.

Repande rengöringsmedel eller repande verktyg, t.ex. stålull, får inte användas.

Skötbordsmadrassen kan rengöras med tvållösning eller rekommenderad typ av desinfektionssprit

I det fall madrassen är märkt med att den ska tvättas med tvållösning bör desinfektionssprit undvikas.

Undvik att desinfektionssprit under längre tid kommer i kontakt med skötbordsskivan och madrassen.

## **Reservdelar**

Om någon detalj inte förefaller fungera eller har gått sönder, kontakta Er leverantör. Endast Jeltec originalreservdelar ska användas. Vårt garantiåtagande kan annars upphävas i sin helhet.

Returnering av reservdelar

Ta kontakt med Jeltec vid retur av delar. Återsänd inte reservdelar som förslitits genom normal användning eller skadats genom olyckshändelse. Återsänd förslitna, skadade eller obrukbara delar om fel anses falla under garantiåtagandet. Returnera i så fall delarna omgående, då annars rätten till ersättning kan gå förlorad.

Vid reservdelsbeställning var god ange Skötbordets tillverkningsnummer och typ.

## Anvisningar för återanvändning



Vid återanvändning av skötbordet ska det rengöras, besiktigas och funktionskontrolleras innan det placeras på den nya platsen.

Produkten är tillverkad av återvinningsbart material eller av material som kan återanvändas. Specialinriktade företag tar hand om utslitna delar, monterar ned dem och tar tillvara de material som kan återanvändas.