

Monterings & Installationsanvisning

För att få störst glädje av skötbordet och för att göra installation och handhavande så enkelt som möjligt, läs nogra igenom följande instruktioner och tips innan Ni påbörjar arbetet.

Skötbordet levereras färdigmonterat och klart för användning.

Varm- och kallvattenslangar medföljer inte leveransen. De anpassas till varje enskild installation. Anslutning till vatten och avlopp ska utföras av kompetent person.

Felaktigt montage kan innebära risker för läckage med vattenskador som följd.

Montering på vägg

Tillse att skötbordet skruvas i en bärande väggkonstruktion och på sådant sätt att fullständig säkerhet uppnås, så att skötbordet aldrig riskerar att lossna från skruvförbandet och orsaka skada.

- För att underlätta placeringen av skötbordet i rum med träväggar finns en speciell monteringskena som skall skruvas i väggens regelverk med c-c 600 mm. Skötbordet fästs sedan i skenan med särskilda bultar i skötbordsstativets fästhål. Se separat anvisning nedan och bifogad i monteringsatts.
- Ska skötbordet monteras mot stenvägg bör detta ske med s.k. expanderbult i därför avsedda fästhål i skötbordet.
- Montering av skötbordet på vägg bör utföras av fackman.
- Anslut kabeln från skötbordet till petskyddat 220 V jordat vägguttag.
- Kontrollera att skötbordsskivan inte går emot väggen eller andra hinder, utan kan köras fritt upp och ner. Rekommenderat fritt utrymme vid sidorna är ca 100 mm.
- Handkontrollen ska placeras så att den alltid är utom räckhåll för barnen.
- **Observera** att det i vissa fall kan vara nödvändigt att dra fram ett nytt vägguttag för att kunna installera stativet. Detta skall göras av behörig person. **Förläng ej kabeln till elmotorn.**
- Tryck på handkontrollens Upp-pil och kör stativet till max höjd för att få en bra arbetsställning för det fortsatta monteringsarbetet.
- Montera vattenblandaren i det fall skötbordet är utrustat med tvättdel. Se till att de medföljande packningarna monteras på rätt sätt, för att undvika vatteninträngning i skötbordsskivan. Ytterligare information om blandaren kan fås på www.moraarmatur.se.
- Anslut varm- och kallvatten via avpassade flexibla slangar (ingår ej i leveransen).
- Anslut den medlevererade avloppsslangen från bottenventilen till lämplig golvbrunn eller annat avlopp. Kontrollera att den blir tillräckligt lång och att den monteras på sådant sätt att en fullgod funktion erhålls.
- Lägg skötbordsmadrassen på skivan. Bordet är nu klart för att användas!

- Vi rekommenderar som en extra säkerhetsåtgärd, att en timer monteras vid vägguttaget för att förhindra obehörig användning av skötbordet


-

Förvara alltid handkontrollen utom räckhåll för barn!


OBS! Det är viktigt att samtliga personer som ska använda skötbordet läser igenom och följer instruktionerna i bruksanvisningen. Lämna därför dessa dokument till personalen efter installationen!

Elit Vagg

Monteringsinstruktioner

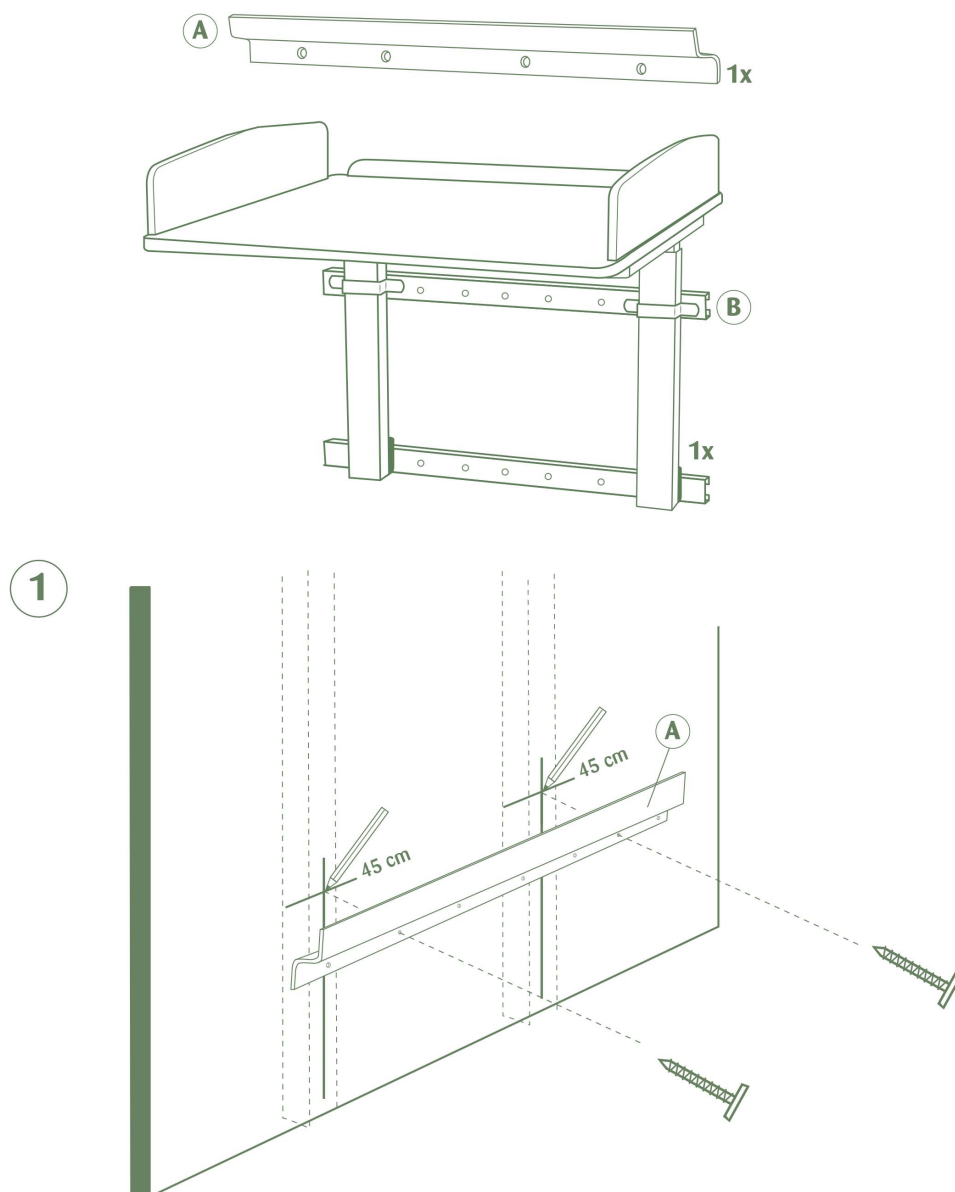

2

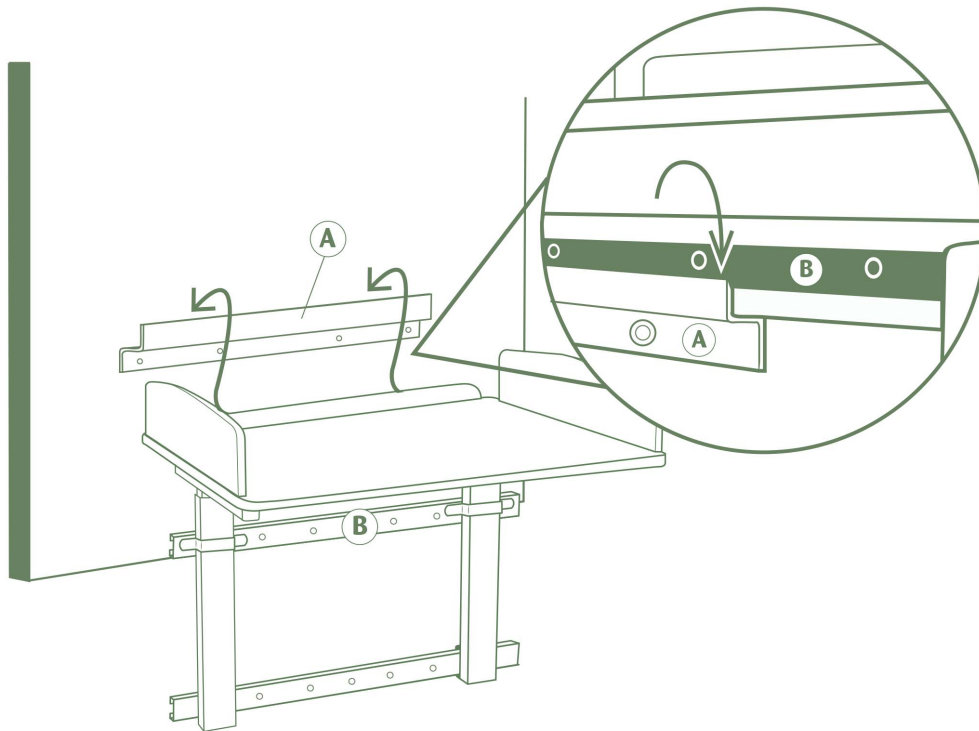

3

