

Monterings & Installationsanvisning

För att få störst glädje av skötbordet och för att göra installation och handhavande så enkelt som möjligt, läs noga igenom följande instruktioner och tips innan Ni påbörjar arbetet.

Skötbordet levereras färdigmonterat och klart för användning.

Varm- och kallvattenslangar medföljer inte leveransen. De anpassas till varje enskild installation. Anslutning till vatten och avlopp ska utföras av kompetent person.

Felaktigt montage kan innebära risker för läckage med vattenskador som följd.

Om IR-detektor ska installeras se separat instruktion.

Installation Skötbord Lyfta med fristående golvstativ

- Med bultarna (som motorskåpet vid leverans är monterat i pallen med) fäster du benen på undersidan av skåpet. Då skötbordet är mindre än 120cm brett ska benen monteras så att de pekar rakt fram. Då skåpet är 120cm brett eller mer ska benen monteras så att de pekar snett framåt/utåt.
- Placera stativet på avsedd plats och justera golvstativet för eventuella ojämnheter i golvet med de ställbara justerskruvarna, så att skötbordet står stadigt och i våg på golvet, med den bakre delen av golvbalkarna mot väggsöckeln.
- Montera golvreglarna under motorlådan med de 4 medföljande M10x60 som ligger i paketet med benstativen.
- Anslut kabeln från skötbordet till petskyddat 220 V jordat vägguttag. Strömförbrukningen är 2,8 A. **Observera** att det i vissa fall kan vara nödvändigt att installera ett nytt vägguttag. Detta skall i så fall göras av behörig elektriker.
- **Förläng ej kabeln till el-motorn.** Om nyinstallation av el-kontakt ska utföras rekommenderas att den monteras ca 140 cm från golv, utom räckhåll för barn, centrerad på den yta som skötbordet täcker.
- Montera skötbordsskivan med de två medföljande skruvarna.
- Kontrollera att skötbordsskivan inte går emot väggen eller andra hinder, utan kan köras fritt upp och ner med tillräckliga avstånd mellan skötbord och omgivande ytor. EN ISO 13857 och EN ISO 13854:2019 ger riktlinjer för skyddsavstånd till angränsande utrustning och byggnadsdelar. Tabellen nedan är hämtad från EN ISO 13854:2019 och visar skyddsavstånd runt höj- sänkbara skötbord.

Kroppsdel	Minsta avstånd (mm)
Arm	120
Ben	180
Finger	25
Fot	120
Hand / handled / knytnäve	100
Huvud	300
Kropp	500
Tå	50

- Handkontrollen ska placeras så att den alltid är utom räckhåll för barnen.
- Tryck på handkontrollens Upp-pil och kör stativet till max höjd för att få en bra arbetsställning för det fortsatta monteringsarbetet.
- Montera vattenblandaren i det fall skötbordet är utrustat med tvättedel. Se till att de medföljande packningarna monteras på rätt sätt, för att undvika att vatten tränger in i skötbordsskivan.
- Anslut varm- och kallvatten via avpassade flexibla slangar (ingår ej i leveransen).
- Anslut den medlevererade avloppsslangen från bottenventilen till lämplig golvbrunn eller annat avlopp. Kontrollera att den blir tillräckligt lång och att den monteras på sådant sätt att en fullgod funktion erhålls.
- **Tips!** Se till att avloppsslangen har tillräckligt fall när bordet är i sitt lägsta läge, så att det aldrig står vatten kvar i slangen.
- Justera skötbordsskivans vågläge, vid behov, med de bågige justerskruvarna mellan stativet och skötbordsramen.
- Lägg skötbordsmadrassen på skivan. Bordet är nu klart för att användas!
- Vi rekommenderar som en extra säkerhetsåtgärd, att en timer monteras vid vägguttaget för att förhindra obehörig användning av skötbordet

Förvara alltid handkontrollen utom räckhåll för barn!

OBS! Det är viktigt att samtliga personer som ska använda skötbordet läser igenom och följer instruktionerna i bruksanvisningen. Lämna därför dessa dokument till personalen efter installationen!