

Bruksanvisning för Skötbord Manuela



Innehållsförteckning:

Förutsedd användning
Försäkran om överensstämmelse
Teknisk beskrivning
Säkerhetsanvisningar
Monterings & Installationsanvisning
Bruksanvisning
Felsökning
Underhåll
Rengöring
Reservdelar
Återanvändning

Jeltec AB
Idögatan 35
582 78 Linköping

Tel.: 013-14 83 00
E-post: info@jeltec.se
Hemsida: www.jeltec.se

Utgåva 01-2022
Instruktionsbok i original

Endast behörig personal får använda skötbordet!

Innan skötbordet tas i bruk **skall** användaren skaffa sig kunskaper om handhavande, risker och säkerhet. Detta sker genom att studera bruksanvisningen, samt genom att alltid följa givna instruktioner.

Förutsedd användning

Det höj och sänkbara skötbordet är avsett att användas **dels** för att helt slippa lyft av barnen, **dels** för att enkelt kunna anpassas till rätt arbetshöjd för användaren.

Använd aldrig skötbordet för andra lyftändamål, och ej för andra laster än barn samt utrustning som behövs för skötsel av barn.

Det är förbjudet för andra än barn att befinna sig på skötbordet.

Jeltec skötbord är konstruerade för inomhusbruk i förskolemiljö. De uppfyller väl de krav som ställs vid en CE märkning. Lika fullt kan en olycka aldrig helt uteslutas om hanteringen sker felaktigt.

Skötbordet med dess tilläggsutrustning är ingen lekplats – ha alltid uppsikt över barnen!

Skötborden är helt igenom tillverkade för minsta möjliga negativa inverkan på miljön, både under tillverkningsprocessen och som färdig produkt, samt inte minst för att möjliggöra en korrekt återvinning.

Förändringar av skötbordet som påverkar drift- eller funktionssäkerhet är inte tillåtna. Diskutera planerade förändringar med Jeltec för att få en bedömning av lämpligheten och vilka konsekvenser som uppstår. Vi tar endast ansvar för sådana förändringar som gjorts med vårt skriftliga medgivande.

OBS!

Det är viktigt att samtliga personer som ska använda skötbordet läser igenom och följer instruktionerna i bruksanvisningen.

Lämna därför dessa dokument till personalen efter installationen!

Dessa instruktioner ska åtfölja skötbordet om det flyttas till annan plats.

Försäkran om överensstämmelse Enligt EG's maskindirektiv 2006/42/EG, Bilaga 2A

Tillverkare **Jeltec AB**
 Idögatan 35
 582 78 Linköping
 Tel. 013-14 83 00
 E-post: info@jeltec.se

Försäkrar härmed att Skötbord Lyfta Golv Modell

är alla tillämpliga delar tillverkad i överensstämmelse med Europaparlamentets och Rådets direktiv **2006/42/EG** av den 17 maj 2006 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om **Maskiner**.

I tillämpliga delar har bl.a. följande harmoniserade standards beaktats vid konstruktion och tillverkning:



SS-EN 60204-1 Maskinsäkerhet - Maskiners el-utrustning - Allmänna fordringar

Linköping 2020-01-03


Petra Gullberg
VD

Teknisk Beskrivning Skötbord Manuela

Följande modeller omfattas av denna instruktion


	
Manuela med helskiva finns i storlekarna 60, 80, 100 och 120 cm	Manuela med tvättedel till höger eller vänster i storlekarna 100 eller 120cm.

Modell:	Manuela 60	Manuela 80	Manuela 100	Manuela 120
Bredd, skötbordsskiva:	600 mm	800 mm	1000 mm	1200 mm
Djup, skötbordsskiva:	800 mm	800 mm	800 mm	800 mm
Bredd, benstativ:	800 mm	630 mm	925 mm	925 mm
Djup, benstativ:	700 mm	630 mm	620 mm	620 mm
Vertikalrörelse max	300 mm	300 mm	300 mm	300 mm
Maxlast	25 kg	25 kg	25 kg	25 kg
Egenvikt	20 kg	21kg	24 kg	28 kg

Gemensamma uppgifter

- Skötborden är avsedda att placeras fristående i t.ex. ett skötrum
- Bordsytans lägsta höjd över golv: ca 750 mm och högsta ca 1050 mm.
- Skötborden är grundutrustade med madrass och höga skötbordskanter

Manövrering av Skötbord Manuela

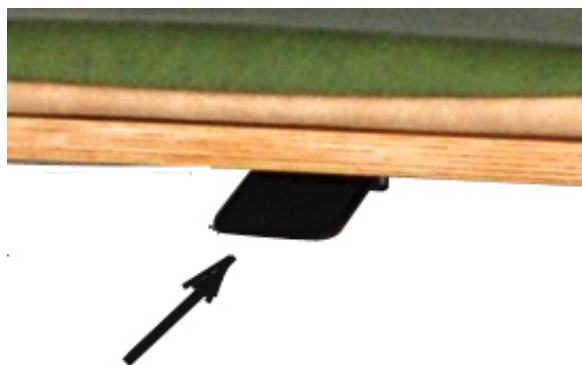

Arbetshöjden på skötbordet Manuela kan du mycket lätt och enkelt justera med handkraft.

Manuela har en så mjuk och fin funktion att du med en hand kan ändra arbetshöjden på skötbordet (75-105 cm) med hjälp av manöverdonet under bordsskivan. Praktiskt och bra om du kommer till skötbordet med ett barn i famnen.

Rörelsen sker med hjälp av en gasfjäder i vardera bordsbenet.

Gasfjädern är fylld med kvävgas som är en inert gas, och den är varken explosiv eller farlig att andas in.

Höjdstjusteringen görs innan barnet har placerats på skötbordet.

Säkerhetsinstruktioner

Skötbordet är konstruerat för att förebygga och undvika skador och olyckor. Det är ändå mycket viktigt att användaren är väl instruerad i sättet att installera och handha skötbordet.

- Skötbordet får endast användas på det sätt som beskrivs på sid. 2.
- **Det är viktigt att barn på skötbordet eller i dess närhet alltid hålls under strikt uppsikt. Lämna aldrig ett barn oövervakat på skötbordet. Skötbordet är ingen lekplats!**
- Handhavandet måste ske på ett sådant sätt att risk för skador på person och egendom inte uppstår.
- Skötbordet får endast handhas av personer som läst och förstått dessa instruktioner och har behörighet att använda det. Tänk på att du som användare har ansvar för att ingen kommer till skada.
- Skötbordet och arbetsområdet måste vara i fullgott skick. Skötbordet får ej användas om skador eller fel uppkommit som påverkar drift- och funktionssäkerheten, ej heller om skötbordet har reparerats, ändrats eller justerats utan ansvarig persons tillstånd och godkännande.
- Tillse att skötbordet står stadigt och plant.
- Kontrollera att skötbordsskivan inte går emot väggen eller andra hinder, utan kan köras fritt upp och ner med tillräckliga avstånd mellan skötbord och omgivande ytor. EN ISO 13857 och EN ISO 13854:2019 ger riktlinjer för skyddsavstånd till angränsande utrustning och byggnadsdelar. Tabellen nedan är hämtad från EN ISO 13854:2019 och visar skyddsavstånd runt höj- sänkbara skötbord

Kroppsdel	Minsta avstånd (mm)
Arm	120
Ben	180
Finger	25
Fot	120
Hand / handled / knytnäve	100
Huvud	300
Kropp	500
Tå	50

- Sänk inte skötbordet om inte utrymmet under är fritt från personer eller föremål.
- Utför inga lyft- eller sänkrörelser om någon befinner sig på stegen eller på skötbordet.
- Förändringar av skötbordet som påverkar drift- eller funktionssäkerhet är inte tillåtna. Diskutera planerade förändringar med Jeltec för att få en bedömning av lämpligheten och vilka konsekvenser som uppstår. Vi tar endast ansvar för sådana förändringar som gjorts med vårt skriftliga medgivande.
- Skyltar och märkningar får ej avlägsnas eller göras oläsliga.
- Överbelasta inte skötbordet. Se Tekniska data och Maxlastskylt. Lasten förutses vara jämnt utbredd och fördelad på skötbordets yta.
- Skötbordet ska årligen genomgå kontroll av kompetent person i syfte att förebygga olycksfall. Besiktning av ackrediterat besiktningsföretag krävs ej.
- Flytta inte skötbordet utan att först koppla loss vatten- och avloppsanslutningar, om det är försett med tvätthö.
- Boverkets, Arbetsmiljöverkets och andra myndigheters föreskrifter ska efterlevas.

- Vid användning i publik miljö, speciellt där barn kan komma in i skötbordets arbetsområde, ska operatören vidta tillräckliga åtgärder för att förhindra att personer kommer in i riskområdet t.ex. genom att avspärra arbetsområdet.
- Skötbordet ska vid behov skyddas mot obehörig användning med hjälp av t.ex. placering i låsbart utrymme.
- Vid inspektioner, service och reparationer ska skötbordsytan vara tömd.
- Installation, service och reparationer får endast utföras av personal som har erforderlig kompetens.
- Endast Jeltec originalreservdelar ska användas vid utbyte av delar. Vårt garantiåtagande kan annars upphävas i sin helhet.

Monterings & Installationsanvisning

För att få störst glädje av skötbordet och för att göra installation och handhavande så enkelt som möjligt, läs noga igenom följande instruktioner och tips innan Ni påbörjar arbetet.

Skötbordet levereras färdigmonterat och klart för användning.

Varm- och kallvattenslangar medföljer inte leveransen. De anpassas till varje enskild installation. Anslutning till vatten och avlopp ska utföras av kompetent person.

Felaktigt montage kan innebära risker för läckage med vattensador som följd.

Installation

Placera stativet på avsedd plats och justera för eventuella ojämnheter i golvet med de ställbara justerskruvarna golvstativet, så att skötbordet står stadigt och i våg på golvet .

- Kontrollera att skötbordsskivan inte går emot väggen eller andra hinder, utan kan köras fritt upp och ner. Rekommenderat fritt utrymme vid sidorna se sid 2.
- Använd handreglaget och kör stativet till max höjd för att få en bra arbetsställning för det fortsatta monteringsarbetet (Om tvättdel ingår).
- Montera vattenblandaren med duschhandtaget i det fall skötbordet är utrustat med tvättdel. Se till att de medföljande packningarna monteras på rätt sätt, för att undvika vatteninträngning i skötbordsskivan. Vattenblandare. Se separat bifogad skötsel-anvisning till blandaren. Anslut varm- och kallvatten via avpassade flexibla slangar.
- Anslut den medlevererade avloppsslangen från bottenventilen till lämplig golvbrunn eller annat avlopp. Kontrollera att den blir tillräckligt lång och att den monteras på sådant sätt att en fullgod funktion erhålls.
- Lägg skötbordsmadrassen på skivan. Bordet är nu klart för att användas!

OBS! Det är viktigt att samtliga personer som ska använda skötbordet läser igenom och följer instruktionerna i bruksanvisningen. Lämna därför dessa dokument till personalen efter installationen!

Bruksanvisning

Före användning:

- Kontrollera att det inte finns något barn eller främmande föremål under skötbordet före eller under justering av arbetshöjd.
- Gör höjdinställningen innan barnet placeras på skötbordet.
- Använd handreglaget och ställ in önskad arbetshöjd.

Användning

- Om barnet är tillräckligt stort använd gärna stegen, som barnet själv kan klättra upp på. Lossa steglåset, dra ut stegen och lägg ner den mot golvet.
- Ha aldrig mer än ett barn i taget på skötbordet, eftersom det kan vara svårt att kontrollera barns rörelser.

Efter användning:

- Lyft upp och spärra stegen i parkeringsläget, för att förhindra att den används som lekplats.

Felsökning

Skötbordet fungerar inte alls?

Kontrollera att:

- det inte finns utrusning runt skötbordet som förhindrar rörelsen.
- Reglaget går att tryck in ordentligt.

Fungerar inte bordet trots att ovanstående punkter är OK?

- Kontakta oss på Jeltec tel: 013 – 14 83 00

OBS!

Det är viktigt att samtliga personer som ska använda skötbordet läser igenom och följer instruktionerna i bruksanvisningen.

Lämna därför dessa dokument till personalen efter installationen!

Underhåll

Skötbordet är underhållsfritt. Smörjning och andra åtgärder är gjorda på fabrik för lyftens hela livstid.

Ur säkerhetssynpunkt bör dock vissa komponenter kontrolleras årligen. Inspektioner, eventuell service och reparationer ska utföras av kompetent personal. Tag bort föremålen på skötbordsytan innan underhålls- och reparationsarbeten utförs.

- Kör skötbordet ner och upp hela vägen till respektive ändläge. Kontrollera att det löper fritt utan hinder, klämrisker och utan missljud. Kontrollera att det stannar och står kvar i nedre respektive övre läge.

Rengöring

I sin användning i rumsmiljö kan mekanismen utsättas för nedsmutsning. Eftersom skötbordet innehåller elektriska komponenter är det mycket viktigt att rengöringen följer den rekommenderade beskrivningen.

Skötselråd:

Skötbordet rengörs med ljummet vatten och ett icke repande rengöringsmedel, innehållande tvål eller liknande. Använd Wettextrasa eller liknande. Efter rengöring ska ytorna torkas torra för att undvika kalkavlagringar.

Repande rengöringsmedel eller repande verktyg, t.ex. stålull, får inte användas.

Skötbordsmadrassen kan rengöras med tvållösning eller rekommenderad typ av desinfektionssprit

I det fall madrassen är märkt med att den ska tvättas med tvållösning bör desinfektionssprit undvikas.

Undvik att desinfektionssprit under längre tid kommer i kontakt med skötbordsskivan och madrassen.

Reservdelar

Om någon detalj inte förefaller fungera eller har gått sönder, kontakta Er leverantör. Endast Jeltec originalreservdelar ska användas. Vårt garantiåtagande kan annars upphävas i sin helhet.

Returnering av reservdelar

Ta kontakt med Jeltec vid retur av delar. Återsänd inte reservdelar som förslitits genom normal användning eller skadats genom olyckshändelse. Återsänd förslitna, skadade eller obrukbara delar om fel anses falla under garantiåtagandet. Returnera i så fall delarna omgående, då annars rätten till ersättning kan gå förlorad.

Vid reservdelsbeställning var god ange Skötbordets tillverkningsnummer och typ

Anvisningar för återanvändning




Vid återanvändning av skötbordet ska det rengöras, besiktigas och funktionskontrolleras innan det placeras på den nya platsen.

Maskinen är tillverkad av återvinningsbart material eller av material som kan återanvändas. Specialinriktade företag tar hand om utslitna maskiner, monterar ned dem och tar tillvara de material som kan återanvändas.

Återvinning av gasfjädrar

Gasfjädrar består till övervägande del av metall och kan därför återvinnas. Om du själv ska göra dig av med en gasfjädr, till exempel om den blivit skadad eller på annat sätt blivit obrukbar, ska du tänka på följande:

1. Gör gasfjädrern trycklös genom att borra ett 3 mm hål 20 mm från cylinderändan då den är fixerad i vertikalt läge med kolvstången nedåt och i max utskjutet läge. Observera att du ska använda godkända skyddsglasögon, skyddskläder och hörsel-skydd då detta sker, eftersom det pyser till vid genombrottsögonblicket och du kan exponeras för mindre mängder olje- och metallpartiklar. Se skiss.

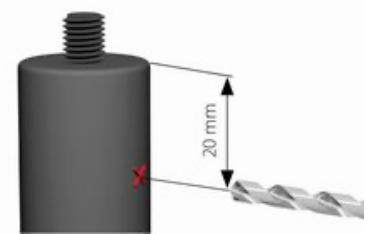

Kvävgasen som finns i cylindern är en inert gas och den är varken explosiv eller farlig att andas in.

2. Töm ut oljan genom det borrhade hålet genom att trycka in och dra ut kolvstången upprepade gånger vid behov. Återvinn spilloljan enligt lokala föreskrifter.

3. Nu kan gasfjädrern lämnas till metallåtervinning enligt lokala föreskrifter.

Metallåtervinningsanläggningar kan numera ofta hantera gasfjädrar säkert utan att de behöver göras trycklösa först. Kontrollera dock alltid detta med din återvinningscentral.

OBS! Om Du inte känner dig säker på hur du ska gå tillväga lämna gasfjädrern till personal på återvinningscentralen, eller be en kompetent tekniker om hjälp.

Skyltar

Produkten är försedd med följande skyltar:

Maskinskylt Placerad på pelaren.