

Monterings & Installationsanvisning

För att få störst glädje av skötbordet och för att göra installation och handhavande så enkelt som möjligt, läs noga igenom följande instruktioner och tips innan Ni påbörjar arbetet.

Skötbordet levereras färdigmonterat och klart för användning.

Varm- och kallvattenslangar medföljer inte leveransen. De anpassas till varje enskild installation. Anslutning till vatten och avlopp ska utföras av kompetent person.

Felaktigt montage kan innebära risker för läckage med vattenskador som följd.

Installation

Placera stativet på avsedd plats och justera för eventuella ojämnheter i golvet med de ställbara justerskruvarna golvstativet, så att skötbordet står stadigt och i våg på golvet .

- Kontrollera att skötbordsskivan inte går emot väggen eller andra hinder, utan kan köras fritt upp och ner. Rekommenderat fritt utrymme vid sidorna är 100 mm.
- Använd handreglaget och kör stativet till max höjd för att få en bra arbetsställning för det fortsatta monteringsarbetet (Om tvättedel ingår).
- Montera vattenblandaren med duschhandtaget i det fall skötbordet är utrustat med tvättedel. Se till att de medföljande packningarna monteras på rätt sätt, för att undvika vatteninträning i skötbordsskivan. Vattenblandare. Se separat bifogad skötsel-anvisning till blandaren. Ytterligare information om blandaren kan fås på www.moraarmatur.se.
- Anslut varm- och kallvatten via avpassade flexibla slangar.
- Anslut den medlevererade avloppsslangen från bottenventilen till lämplig golvbrunn eller annat avlopp. Kontrollera att den blir tillräckligt lång och att den monteras på sådant sätt att en fullgod funktion erhålls.
- Lägg skötbordsmadrassen på skivan. Bordet är nu klart för att användas!

OBS! Det är viktigt att samtliga personer som ska använda skötbordet läser igenom och följer instruktionerna i bruksanvisningen. Lämna därför dessa dokument till personalen efter installationen!